



图片仅供参考

LDZH系列

《 灭菌模式

STERILIZATION MODES

本器具具有常规、内循环自动排汽、两种灭菌模式：

一、 常规灭菌模式：

具有对金属器械、织物敷料、玻璃器皿、橡胶制品等物品进行快速灭菌之外，还具备对培养基、液体等生物制品的灭菌功效，常规灭菌模式可选择121℃、126℃、134℃三个灭菌键进行灭菌，并可根据不同需要选择自选键（温度可调范围105℃~138℃）进行灭菌；

二、 内循环自动排汽灭菌模式：

在具备常规灭菌模式的功能之外，本器在灭菌结束后具有内循环自动排汽泄压功能，使得整个灭菌过程中无蒸汽外泄现象，从而确保了灭菌环境更加安全。

《 技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

参数/型号 Parameter/Model	LDZH-100KBS-I	LDZH-150KBS-I	LDZH-200KBS-I
配置 Configure	蒸汽内排	蒸汽内排	蒸汽内排
腔体材质 Cavity Material (mm)	S30408	S30408	S30408
腔体壁厚 Pot wall thickness (mm)	3.0	3.0	3.0
毛重 GW (kg)	~188	~213	~238
电压/功率 Voltage/Power	380V/6kW	380V/6kW	380V/6kW
产品尺寸 Product Size (mm)	660×1190×700	660×1420×700	660×1655×700
使用容积 Volume (D×H mm)	500×520	500×770	500×1000
时间设定范围 Time Setting Range	1~99 h	1~99 h	1~99 h
工作压力 Work Pressure	0.217MPa	0.217MPa	0.217MPa
最高灭菌温度 Maximum Sterilization Temperature	50~134℃	50~134℃	50~134℃

2025年4月



专业 专注 专心

服务至上，真挚服务，只为您的满意

申 安 医 疗

📍 上海市嘉定区和静路2000号

📞 021-59577853 59570238

☎ 021-59564552 39586180

🌐 www.shenan.com.cn

✉ webmaster@shenan.com.cn

saqy@shenan.com.cn

新品样册

New Product Catalog

上海申安医疗器械厂

Shanghai Shenan Medical Instrument Factory

产品简介

PRODUCTS



图片仅供参考

灭菌模式

STERILIZATION MODES

本器具具有常规、内循环自动排汽、脉动预真空、真空干燥四种灭菌模式：

一、 常规灭菌模式：具有对金属器械、织物敷料、玻璃器皿、橡胶制品等物品进行快速灭菌之外，还具备对培养基、液体等生物制品的灭菌功效，常规灭菌模式可选择 121℃、126℃、134℃三个灭菌键进行灭菌，并可根据不同需要选择自选键（温度可调范围 105℃~138℃）进行灭菌；

二、 内循环自动排汽灭菌模式：在具备常规灭菌模式的功能之外，本器在灭菌结束后具有内循环自动排汽泄压功能，使得整个灭菌过程中无蒸汽外泄现象，从而确保了灭菌环境更加安全；

下方“四种灭菌模式”均适用于 TZM、 SZM、 LDZG 系列机型。

- 三、 脉动预真空灭菌模式：使用脉动预真空灭菌方式是提高灭菌效果的可靠保障，从而：
- 1、解决了灭菌要求高的（如：对三角瓶内、玻璃管内、罐装液体等）灭菌不彻底等问题；
- 2、脉动预真空模式中具有脉动排汽功能，解决了灭菌液体时因快速泄压排汽，造成罐装（瓶内）液体外溢、塑袋包装破裂等情况的发生；
- 四、 真空干燥灭菌模式：在真空干燥模式中内置覆盖了脉动预真空运行，灭菌结束后真空干燥对织物（敷料）灭菌干燥度为 ≤1%；对金属（器械）灭菌干燥度为 ≤0. 2%，具有灭菌彻底干燥度符合国标要求等特点。

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

参数/型号 Parameter/Model	TZM-18L	TZM-23L	TZM-29L
配置 Configure	脉动真空干燥型	脉动真空干燥型	脉动真空干燥型
腔体材质 Cavity Material (mm)	S30408	S30408	S30408
腔体壁厚 Pot wall thickness (mm)	2. 2	2. 2	2. 2
重量 Weights (kg)	~53	~54	~55
电压/功率 Voltage/Power	220V/2. 2kW	220V/2. 2kW	220V/2. 2kW
产品尺寸 Product Size (mm)	570×530×572	570×530×572	570×530×572
网篮尺寸 Mesh Basket Size (mm)	230×240×250	230×240×350	230×240×450
时间设定范围 Time Setting Range	1~9999min	1~9999min	1~9999min
工作压力 Work Pressure	0. 217MPa	0. 217MPa	0. 217MPa
最高灭菌温度 Maximum Sterilization Temperature	138℃	138℃	138℃

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

参数/型号 Parameter/Model	SZM-18L	SZM-23L	SZM-29L
配置 Configure	脉动真空干燥型	脉动真空干燥型	脉动真空干燥型
腔体材质 Cavity Material (mm)	S30408	S30408	S30408
腔体壁厚 Pot wall thickness (mm)	2. 2	2. 2	2. 2
重量 Weights (kg)	~53	~54	~55
电压/功率 Voltage/Power	220V/2. 2kW	220V/2. 2kW	220V/2. 2kW
产品尺寸 Product Size (mm)	440×400×800	440×400×800	440×400×800
使用容积 Volume (D×H mm)	280×390	280×290	280×210
时间设定范围 Time Setting Range	1~9999min	1~9999min	1~9999min
工作压力 Work Pressure	0. 217MPa	0. 217MPa	0. 217MPa
最高灭菌温度 Maximum Sterilization Temperature	138℃	138℃	138℃

新产品即将上市

技术参数

TECHNICAL PARAMETERS

参数/型号 Parameter/Model	LDZG-50L	LDZG-75L
配置 Configure	脉动真空干燥型	脉动真空干燥型
腔体材质 Cavity Material (mm)	S30408	S30408
腔体壁厚 Pot wall thickness (mm)	内套2. 0 外套3. 0	内套2. 0 外套3. 0
重量 Weights (kg)	~145	~150
电压/功率 Voltage/Power	220V/3kW	220V/3kW
产品尺寸 Product Size (mm)	550×640×1150	550×640×1150
使用容积 Volume (D×H mm)	370×500	370×650
时间设定范围 Time Setting Range	1~9999min	1~9999min
工作压力 Work Pressure	0. 217MPa	0. 217MPa
最高灭菌温度 Maximum Sterilization Temperature	138℃	138℃

LDZG系列

